

SPORTMUNDSCHUTZ

Mouthguard

- Für verschiedene Sportarten
- Viele Farben und Farbkombinationen
- Auch mit Vereinslogo oder Namen



SPORTMUNDSCHUTZ „MOUTHGUARD“ FÜR EIN HÖCHSTMASS AN SICHERHEIT



Sport ist für aktive Menschen jeden Alters ein besonders wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens. Gerade für Kinder und Jugendliche ist ausreichend Bewegung die Voraussetzung für eine positive Entwicklung. Um auch bei gefahrgeneigten Sportarten für ein Höchstmaß an Sicherheit zu sorgen, sollte man nicht auf das Tragen eines Sportmundschutzes verzichten. Vollständige und gepflegte Zahnreihen gehören heute in jedem Alter zu einem positiven Lebensgefühl.

(Laut der American Dental Association werden durch das Tragen eines Mundschutzes allein in Amerika jährlich mehr als 200 000 Verletzungen im Mundbereich verhindert.)

Wie wirkt ein Mouthguard?

Ein speziell für verschiedene Sportarten entwickelter Mundschutz dient dazu, Zähne und auch Kiefer vor Verletzungen zu schützen. Natürlich eignet sich hierzu besonders ein für den Sportler individuell hergestellter Mundschutz, wie der Mouthguard. Anders als bei einem „Mundschutz von der Stange“ fügt sich ein Mouthguard in der jeweils individuell benötigten Stärke exakt an die Zähne und die Kieferpartien an und sorgt so für eine optimale Schutzfunktion. Die Zahnreihen werden in einem genau definierten Abstand zueinander geschützt. Eventuell auftretende Kräfte durch Stöße oder Schläge werden durch die verschiedenen Schichten und die Beschaffenheit des Materials absorbiert. So wirken auf die Zähne und Kieferpartien im Falle eines Falles nicht mehr die extremen Kräfte ein, die sonst zu einem Trauma führen könnten.



OPTIMALE PASSFORM UND INDIVIDUELLES DESIGN


Wie erhalte ich meinen individuellen Mouthguard?

Gerne informiert Sie ihr Zahnarzt, welche Ausführung für Ihre Sportart die richtige ist. Um Sie oder Ihr Kind optimal zu schützen, kommen verschiedene Materialien und Stärken zum Einsatz. Haben Sie sich für eine bestimmte Variante entschieden, können die benötigten Abdrücke genommen werden. Um alles weitere kümmert sich Ihr Praxis-Team.

Lieferzeit

Nach 7-8 Arbeitstagen liegt Ihr Mouthguard in Ihrer Zahnarztpraxis für Sie bereit.

Farbauswahl

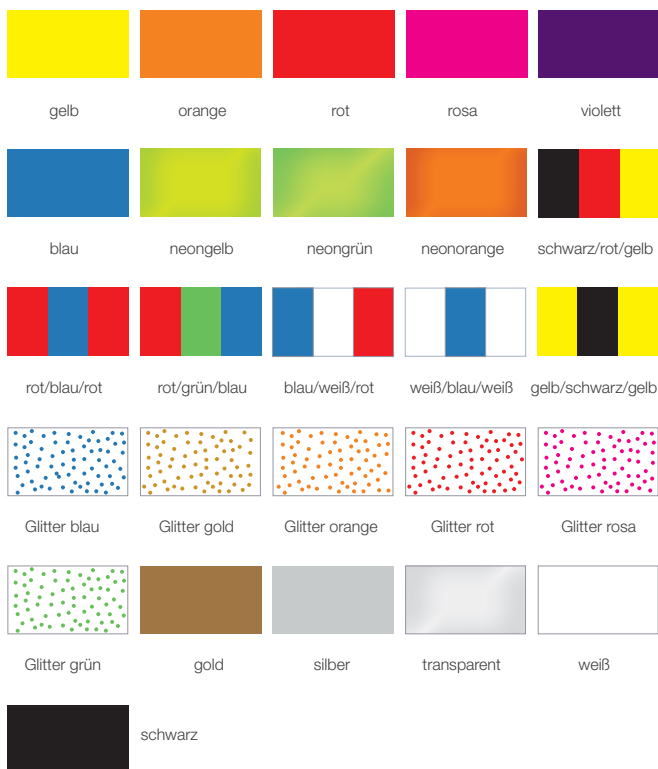

MOUTHGUARD IN FÜNF AUSFÜHRUNGEN

Welcher ist der richtige für Sie?

Farbbeispiele



Junior



Standard



Senior



Elite



Professional

Ausführung	Sportart	
<p>Junior 1 Schicht, 4 mm</p>	kontaktfreie Sportarten (Kinder, Jugendliche)	Gymnastik, Skateboarding, etc.
<p>Standard 1 Schicht, 5 mm</p>	kontaktfreie Sportarten (für Erwachsene)	ExtremradSPORT, Bergsteigen, Gewichtheben, etc.
<p>Senior 1 Schicht, 6 mm</p>	für Sportarten mit leichten Kontakten	Wakeboarding, Baseball, Squash
<p>Elite 3 Schichten, 9 mm (2 x weich + 1 x weich, extra für Schneidezähne)</p>	mittlerer Kontaktsport, angepasst an Gegenkiefer	Fußball, Basketball, Hockey, etc.
<p>Professional 3 Schichten, 9 mm (2 x weich + 1 x hart, extra für Schneidezähne)</p>	harter Kontaktsport, angepasst an Gegenkiefer	Rugby, Boxen, Wrestling, etc.

Praxisstempel

Für ästhetischen Zahnersatz zum smarten Preis
besuchen Sie uns auch auf:

 meine-schoensten-zaehne.de

 facebook.com/meine.schoensten.zaehne

