

DENTAL PLANNING CENTER DSD by Permamental

- Ästhetisches Ziel schon vor Behandlungsbeginn visualisieren.
- Nutzen des digitalen Design-Vorschlags für die Wahl der Behandlung.
- Motivieren Sie Ihre Patienten durch eine realistische Demonstration.



DENTAL PLANNING CENTER

DSD by Permamental

Mit „DSD by Permamental“ erhalten Sie für Ihren Patienten ein typgerechtes und individuell erstelltes digitales „Smile-Design“. Sie werden in der Lage sein, Ihrem Patienten an einem mobilen Endgerät, einem Desktop oder auch in situ aufzuzeigen, wie das spätere Ziel der Versorgung mit Zahnersatz aussehen kann. Nutzen Sie hierfür die Expertise des Digital Smile Design Teams im DSD-Center und der Fachleute bei Permamental.

Vorgehensweise Anmeldung/ „DSD-Account erstellen“

Haben Sie sich entschieden, mithilfe des Dental Planning Center DSD by Permamental ein digitales Behandlungsziel für Ihren Patienten zu erstellen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Registrieren Sie sich mit Ihren Praxisdaten, indem Sie einen „kostenlosen DSD Account erstellen“.
2. Nach Prüfung Ihrer Daten, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link, über den Sie Ihr Passwort erstellen können.
3. Loggen Sie sich mit Ihrer E-Mailadresse und Ihrem Passwort ein.

Vorgehensweise für das Anlegen/ Bearbeiten/Abrufen von DSD-Fällen

Sind Sie in Ihrem DSD-Account angemeldet, können Sie so viele neue Patienten-

Fälle anlegen, wie Sie möchten, sowie Ihre bestehenden Fälle nach Namen und Bearbeitungs-Status sortieren oder suchen. Hier findet auch, über die Fachleute von Permamental, die Kommunikation mit dem DSD-Planungsteam in Madrid statt. Liegt für Sie eine Nachricht oder eine fertige DSD-Präsentation vor, erhalten Sie eine Benachrichtigungs-Mail an die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich ursprünglich angemeldet haben.

Ausführliche Bedienungsanleitung

Sie finden auf der Startseite des DENTAL PLANNING CENTERS, DSD by Permamental unter dem Link „Anleitung“ eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Beschreibung. Hier wird das vereinfachte DSD-Fotoprotokoll (nur 3 Bilder nötig) leicht verständlich beschrieben. Für weitere Fragen unterstützt Sie auch gerne das DSD-Team von Permamental.

Workflow DSD-Planung für Ihren Patienten

Haben wir Ihre Abdrücke oder STL-Dateien (IOS) erhalten, leiten wir die Daten nach einer Eingangsprüfung an das Planungsteam im Digital Smile Design-Center weiter und beauftragen die gewünschte Planung. Nach einigen Tagen erhalten Sie eine Benachrichtigungs-Mail. Sie finden nun den

Designvorschlag in Ihrem DSD-Account. Besprechen Sie diesen Vorschlag auf Wunsch in Ruhe mit Ihrem Patienten und teilen uns mögliche Änderungswünsche in Ihrem Account mit. In diesem Fall erhalten Sie nach einigen Tagen das geänderte Design. Entspricht die Planung Ihren Vorstellungen, erteilen Sie uns eine Freigabe in Ihrem Account. Erst jetzt wird ein Modell des „digitalen Wax-Up“ Ihres Patientenfalls geprintet. Auf diesem Modell wird in den nächsten Tagen ein Putty-Schlüssel angefertigt, mit dem Sie im Mund Ihres Patienten mit zahnfarbenem Acryl oder Composite temporär die gewünschte Zahnsituation erstellen können. Ihr Patient könnte nun das mögliche Ergebnis der geplanten Behandlung in situ betrachten. Außerdem erhalten Sie eine digitale Präsentation im gewünschten Format.

Preise

Kostenlose Anmeldung (DSD-Account erstellen) für Zahnarztpraxen/KFO-Praxen auf der Website www.dentalplanningcenter.de

DSD-Planung, je Kiefer: 299,- €*

Die DSD-Planung beinhaltet:

- digitale Präsentation (pdf, Powerpoint oder Keynote)
- geprintetes Modell
- Puttyschlüssel

*„motivational“, inkl. MwSt., zzgl. Versand



Unser DSD-Team berät Sie gerne oder erstellt Ihnen einen Kostenvoranschlag unter der **Telefon 028 22-1 00 65**