



PREISBEISPIEL

BLEACHING-SET FÜR 1 KIEFER:
indiv. Bleachingschiene,
2 x 3 ml permawhite 10 % Gel

54,99 €*

*inkl. MwSt., zzgl. Versand

***perma*white**

Zahnaufhellungssystem für die Praxis & Zuhause

Fordern Sie kostenlos und unverbindlich
den Permadental-Gesamtkatalog an.

Tel.: 0800 - 737 000 737 | Mail: e.lemmer@permadental.de

PERMADENTAL.DE

0 28 22 - 1 00 65

perma*white* - Zahnaufhellungssystem für die Praxis & Zuhause

Kosmetische Zahnaufhellung

Immer häufiger wünschen sich Patienten eine Aufhellung ihrer Zähne und erwarten dieses Angebot auch von ihrer Zahnarztpraxis. Erfüllen Sie die Wünsche Ihrer Patienten durch den Einsatz des perma*white*-Systems.

Indikation

perma*white* dient der Entfernung von Verfärbungen und der Aufhellung natürlicher Zähne mit einer als zu dunkel empfundenen Zahnfarbe, aus rein kosmetischen oder ästhetischen Gründen. Es können alle Zähne eines Kiefers aufgehellt werden, oder nur bestimmte Zähne.

Wirkungsweise

Das Bleachinggel perma*white* 10 % (Qualitätsprodukt „Made in Germany“) wird in eine individuell angefertigte Bleachingschiene eingebracht und wirkt in einer frei wählbaren Anwendungszeit auf die aufzuhellenden Zähne. Das Gel beinhaltet eine Materialkonzentration von 10 % CP (Carbamid Peroxid) und ~ 3,5 % HP (Wasserstoffperoxid). Diese spezielle Formel kombiniert eine schonende Aufhellung mit optimiertem Ergebnis. So werden Dehydratationen und Sensitivitäten während der Behandlung vermieden. Optional sind im Fachhandel als Ergänzung remineralisierende „After Whitening Mousses“ erhältlich.

Ablauf der Behandlung

- Patienten über Wirkungsweise und Ziel der Zahnaufhellung aufklären.
Dokumentation?
- Abdruck oder Gipsmodell des zu behandelnden Kiefers erstellen.
- Abdruck oder Modell mit ausgefüllten Permadental-Auftragschein (perma*white* notieren) versenden.
- Werden keine Angaben zu den aufzuhellenden Bereichen gemacht, wird eine komplette Bleachingschiene für das Bleachen der Zähne 6 bis 6 angefertigt.
- Nach ca. 9 Tagen wird die Bleachingschiene zusammen mit dem Bleachinggel geliefert.
- Die Erstanwendung (Demonstration) findet in der Praxis statt.
- Der Patient erhält eine Einweisung für die Weiterverwendung zuhause.

Information für die Praxis

Die kosmetische Zahnaufhellung darf nach der neuen EU-Richtlinie zur Kosmetikverordnung nur mit Einschaltung des Zahnarztes durchgeführt werden.

„Die Produkte dürfen nur von Zahnärzten an Patienten abgegeben werden. In jedem Anwendungszyklus muss die erste Anwendung stets einem Zahnarzt vorbehalten sein oder unter dessen direkter Aufsicht erfolgen, falls ein gleichwertiges Sicherheitsniveau gewährleistet ist. Danach kann das Mittel dem Verbraucher für den verbleibenden Anwendungszyklus bereitgestellt werden. Nicht bei Personen unter 18 Jahren anwenden.“ (EU-Richtlinie 2011/84/EU zum Einsatz von kosmetischen „Zahnaufhellern und -Bleichmitteln“) Wir empfehlen vor Behandlungsbeginn eine professionelle Zahnreinigung.

Preise

Bleaching-Set für 1 Kiefer: **54,99 €***

Bleaching-Set für 2 Kiefer: **99,99 € ***

Bleaching-Set für 1 Kiefer: bestehend aus:
individueller Bleachingschiene und
2 x 3 ml perma*white* 10 % Bleaching-Gel

Nachfüllpack (nur als Nachbestellung):

2 x perma*white* 10 % Bleaching-Gel á 3 ml: **22,99 €***

*inkl. MwSt., zzgl. Versand



Kostenlose Patientenflyer und Praxisaufsteller erhältlich.

Gerne senden wir Ihnen Praxisaufsteller und Patientenflyer (ohne Preise) in gewünschter Anzahl zu.

Unser Technik-Team berät Sie gerne unter der Telefonnummer **028 22-1 00 65**

