

permadental[®]
Modern Dental Group



**Schonende Zahnaufhellung
zum smarten Preis.**

***perma*white**

MEINE-SCHÖNSTEN-ZÄHNE.DE

0 800 - 737 000 737



Kosmetische Zahnaufhellung zum smarten Preis

Sie wünschen sich eine schonende Aufhellung ihrer Zähne? Oder die Entfernung von Verfärbungen?

Mit dem neuen permawhite-System zur schonenden Zahnaufhellung kann das in kürzester Zeit in Zusammenarbeit mit Ihrer Zahnarztpraxis erreicht werden.

Die Erstanwendung findet hier in der Praxis statt und die weiteren Anwendungen führen Sie zuhause durch.

Das permawhite-System besteht aus einer für Sie individuell angefertigten Bleachingschiene und dem Zahnaufhellungsgel omni White smile 10 %. Die spezielle Omni WHITE smile-Formel kombiniert eine schonende Aufhellung mit optimiertem Ergebnis. So werden Dehydratationen und Sensitivitäten während der Behandlung vermieden.

Für Patienten ab 18 Jahre.

Patienten-Infos zum Ablauf der geplanten Zahnaufhellung:

- Es wird hier in der Praxis ein Abdruck des Kiefers von den Zähnen genommen, die Sie gerne aufhellen möchten.
- Nach ca. 9 Tagen liegt die individuell für Sie angefertigte Bleachingschiene hier bei uns für Sie bereit.
- Die Erstanwendung findet hier in der Praxis statt. Sie erhalten eine Einweisung für die Weiterverwendung zuhause.
- Wir empfehlen, vor Behandlungsbeginn eine professionelle Zahnreinigung vornehmen zu lassen.

Hinweis für die weiterführende Zahnaufhellung zuhause:

Füllen Sie nur eine geringe Menge des Zahnaufhellungsgels direkt aus der 3 ml-Spritze in die Bleachingschiene. Setzen Sie die befüllte Schiene ein. Der Minzgeschmack wird in der Regel als sehr angenehm empfunden. Nach der Anwendung entnehmen Sie die Schiene aus dem Mund und reinigen sie unter fließendem Wasser unter Zuhilfenahme einer Zahnbürste. Putzen Sie Ihre Zähne wie gewohnt.

Zeit je Anwendung zuhause:

über Nacht (oder tagsüber) mindestens 4 Stunden

Häufigkeit der Anwendung:

je nach gewünschtem Ergebnis 5-12 Anwendungen

Die Anwendungsdauer ist individuell wählbar. Bereits nach einigen Anwendungen stellt sich eine gewünschte Zahnaufhellung ein.

Sprechen Sie uns an!

Praxisstempel

 [meine-schoensten-zaehe.de](https://www.meine-schoensten-zaehe.de)

 facebook.com/meine.schoensten.zaehe

Permadental GmbH | Marie-Curie-Straße 1 | 46446 Emmerich am Rhein
T +49 (0) 28 22-1 00 65 | info@permadental.de | www.permadental.de