

TRIOS 5

Smart-Aufsätze warten und reinigen

Die TRIOS 4-Aufsätze müssen vor dem ersten Gebrauch, zwischen Patienten sowie vor der Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften sterilisiert werden. TRIOS-Spitzen können bis zu 100 Mal resterilisiert werden. Beschädigte TRIOS-Aufsätze müssen ersetzt werden. Zur Sterilisation des Scanneraufsatzes ist gemäß EN13060 ein Vakuumautoklav der Klasse B erforderlich. Das Sicherheits- und Bedienungshandbuch enthält vollständige und aktuelle Informationen. Nachfolgend finden Sie einige der Hauptpunkte:

1. Schritt: TRIOS 5-Spitzen müssen unmittelbar nach Gebrauch gereinigt und sterilisiert werden.



Hinweis: Neue Spitzen müssen vor dem ersten Gebrauch sterilisiert werden.

2. Schritt: Waschen Sie die Spitzen manuell mit lauwarmem Wasser und einer weichen Bürste. Dazu wird ein mildes Spülmittel oder ein ähnliches Reinigungsmittel empfohlen. Wenn der Spiegel immer noch fleckig oder verschmiert ist oder einen milchigen Dunst aufweist, wiederholen Sie die Reinigung, bevor Sie mit Wasser nachspülen.



Hinweis: Trocknen Sie das Glasfenster vorsichtig mit einem Papiertuch ab.

Diese Materialien dienen nur zu Schulungszwecken. Detaillierte Informationen zur ordnungsgemäßen Anwendung finden Sie im offiziellen Sicherheits- und Bedienungshandbuch sowie in der neuesten Ausgabe des Benutzerhandbuches. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, um die Verfügbarkeit von 3Shape-Produkten in Ihrem Land zu prüfen.

3. Schritt: Schritt 3. Geben Sie den Aufsatz in einen Sterilisationsbeutel und verschließen Sie ihn. Sie können entweder einen selbstklebenden oder einen wärmeversiegelten Beutel verwenden.



Verschließen Sie die Aufsätze immer, bevor Sie sie in einem Autoklaven sterilisieren.

4. Schritt: Legen Sie TRIOS 5-Spitzen in den Autoklaven und verwenden Sie je nach Region eines der beiden Programme:

- In den USA: 132 °C (269,6 °F) für einen Zyklus von 4 Minuten Einwirkzeit und 30 Minuten Trockenzeit.
- In der EU: 134 °C (273,2 °F) für einen Zyklus von 3 Minuten Einwirkzeit und 30 Minuten Trockenzeit.



Autoklavierzeiten und -temperaturen variieren je nach Autoklaventyp und -hersteller. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung des Autoklavenherstellers nach, um sicherzustellen, dass die Mindestparameter des Autoklavs eingehalten werden.