

Datenverwaltung



137 Speaker: Christian Musiol, Dirk Ernesti, Jens van Laak | 16.01.25



Um den Scanner komfortabel zu bedienen, müssen Sie immer über ausreichend lokalen Speicherplatz verfügen.

Wenn der Rechner mit vielen unnötigen Daten zugemüllt wird, dann wird der langsam

Sie müssen sich das so vorstellen: Wenn Sie nur 3 Bücher in einem Regal stehen, finden Sie das richtige Buch sofort.

Hat man 1000 Bücher, dauert es schon länger, auch wenn es alphabetisch geordnet ist und man ein System hat es trotzdem länger als wenn man nur 3 Bücher hätte.

Und es ist nicht nur das Suchen, auch das Aufräumen dauert es auch

Genauso ist es mit dem Rechner, je mehr Daten er gespeichert hat, umso langsamer wird er.

Deshalb habe ich auf meinem Rechner nur Programme installiert die brauche,

Alle Unnötigen Daten werden gelöscht oder ausgelagert

Alle die mich können wissen ein Cloud-Fan und ich habe das sehr früh bei uns eingeführt

Wenn man alle Daten in der Cloud hat, dann kann ich von überall auf die Daten zugreifen und weiterarbeiten.

Und das Gleiche können Sie haben, wenn Sie die Scans nicht auf dem Computer lassen, sondern alles in der Medit Cloud speichern.

Ab dann können Sie von jedem Standort aus arbeiten, ohne den Laptop mitzunehmen.

Sie können sich von zu Hause oder im Büro auf den Medit Link einloggen,


die Daten ansehen, bestellen, Notizen hinzufügen,

Fotos hochladen – alles ist möglich, und das alles, ohne den Scanner Laptop zu benutzen.

Ein anderer kann bereits einen neuen Patienten weiterscannen,

und Sie können in Büro trotzdem weiterbearbeiten.

Datenverwaltung

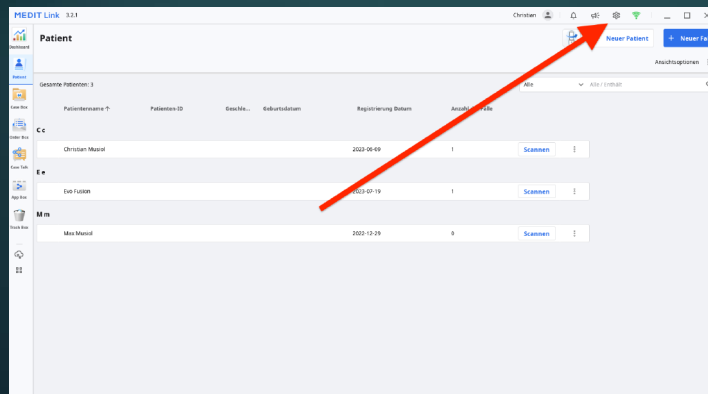

138 Speaker: Christian Musiol, Dirk Ernesti, Jens van Laak | 16.01.25



alles Super easy ohne grosen aufwand


Also, würde ich die Cloud Medit auf jeden Fall Abonieren .
Sie zahlen 9,99 Euro im Monat und haben 10 TB zur Verfügung.

Alles ist ist auch Monatlich Kündbar

also keine Abofalle .


wenn Sie die Cloud abonnieren möchten, gehen Sie einfach in Ihrer Software auf Einstellungen.

Datenverwaltung

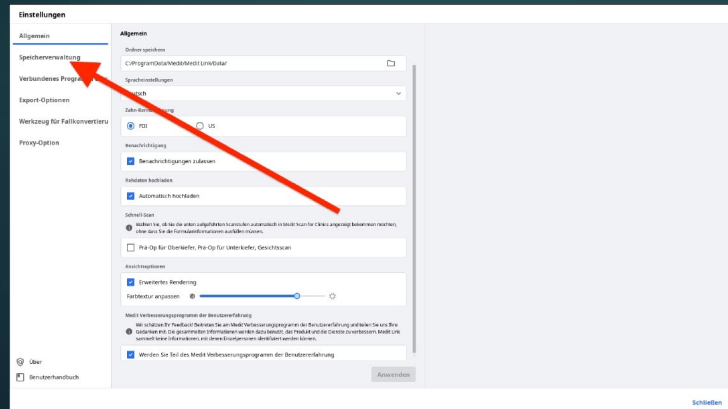

Dann gehen Sie auf Speicherverwaltung

Datenverwaltung

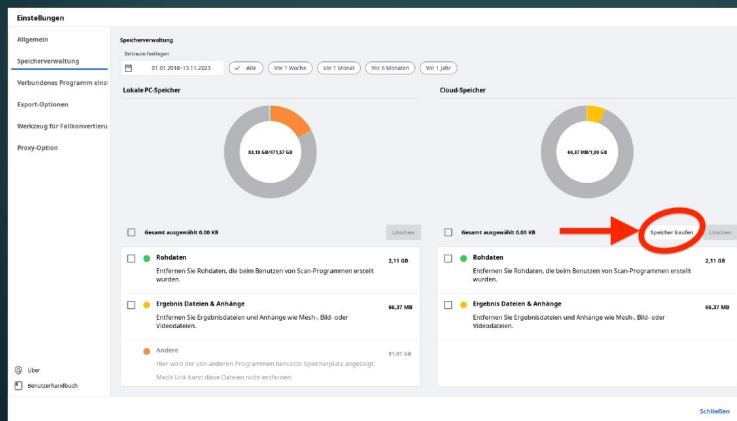


140 Speaker: Christian Musiol, Dirk Ernesti, Jens van Laak | 16.01.25



Und dann auf Speicher Kaufen

Datenverwaltung

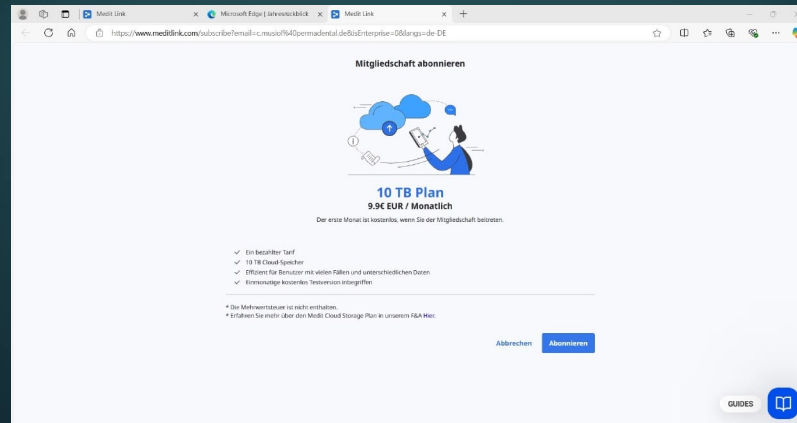

141 Speaker: Christian Musiol, Dirk Ernesti, Jens van Laak | 16.01.25



Dann werden Sie automatisch auf die Seite von Medit weitergeleitet. Klicken Sie dort einfach auf 'Abonnieren'

Datenverwaltung

← MEDIT Link

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics abonnieren

0,00 €

Danach 9,90 € pro Monat, nachdem der Gutschein abläuft

Medit Cloud Storage 10TB Plan for Clinics	9,90 €
Medit Cloud Storage 10TB Plan	9,90 €
100% für neuen Monat	-9,90 €
Steuer	0,00 €
Heute fällige Gesamtsumme	0,00 €

Mit Karte zahlen

E-Mail: c.musiol@permadental.de

Kartendaten

1234 1234 1234 1234

MM / JJ CVC

Name des/der Karteninhaber/in

Vollständiger Name

Land oder Region

Deutschland

Zahlungspflichtig abonnieren

Indem Sie Ihr Abonnement bestätigen, gestatten Sie Medit USA Inc., zukünftige Zahlungen Ihrem Zahlungsinstrument gemäß den allgemeinen Geschäftsbedingungen zu belasten. Sie können Ihr Abonnement jederzeit kündigen.


Powered by [stripe](#) | [Bedingungen](#) | [Datenschutz](#)

142 Speaker: Christian Musiol, Dirk Ernesti, Jens van Laak | 16.01.25



Dann hinterlegen Sie die Daten Ihrer Kreditkarte, und schon haben Sie 10 TB freien Speicher.

Datenverwaltung

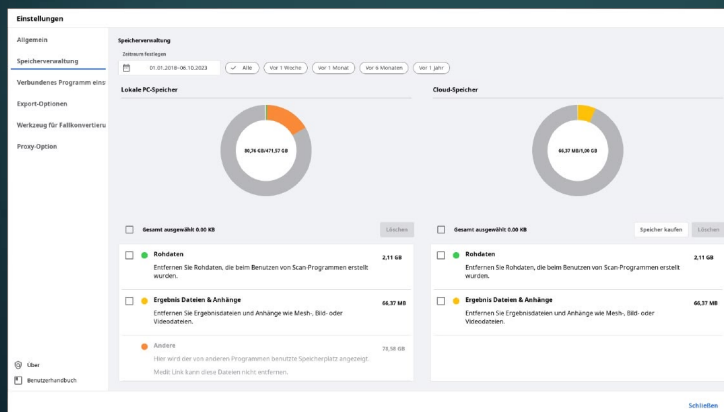


143 Speaker: Christian Musiol, Dirk Ernesti, Jens van Laak | 16.01.25



Nachdem Sie dies erledigt haben,
können Sie mit Daten verlagern anfangen
Sie gehen einfach wieder auf die Speicherverwaltung
und da können Sie sehen wie gerade bei Ihnen aussieht
Wie Sie sehen, haben wir Rohdaten und Ergebnisdateien.
Was ist der Unterschied
Am besten kann man das so erklären
Die Rohdaten sind in der digitalen Welt der Abdruck, und die Ergebnisdaten sind das hergestellte Modell.
Das bedeutet, wenn Sie den Patienten demnächst weiterscannen wollen dann, benötigen Sie die Rohdateien.
Aber wenn die Arbeit fertig ist brauchen Sie die Rohdateien nicht mehr
Wenn man die Ergebnisdatei hat, kann man eine Arbeit trotzdem wiederholen,
Wie man sehen kann
Die Rohdaten sind der größte Speicherfresser, da dort alle Bilder gespeichert sind bevor alles gemacht war
Wie Sie hier sehen können, auf meinem Rechner sind aus 2,11 Rohdateien nur 66,37 MB Ergebnisdateien
geworden.
Sie können die Rohdateien gerne auf dem Rechner speichern, aber dann wird der Rechner ziemlich schnell voll.
Medit sagt, dass Sie die Rohdateien gerne bei denen speichern können und die werden sogar den
Speicherplatz in der Cloud nicht belegen, aber nur für 1 Jahr.
Nach einem Jahr werden die Rohdateien gelöscht, da es eh besser ist, neu zu scannen, weil sich die Situation
verändert hat.
Die Ergebnisdateien bleiben aber auf der Cloud immer unberührt es sei sie löschen die selbst
Deshalb würde ich immer aus Sicherheitsgründen auf jeden Fall die Rohdaten auf der Cloud speichern, es
kostet ja nichts, und wenn die Festplatte kaputt gehen sollte, haben Sie die für ein Jahr gesichert.

Datenverwaltung

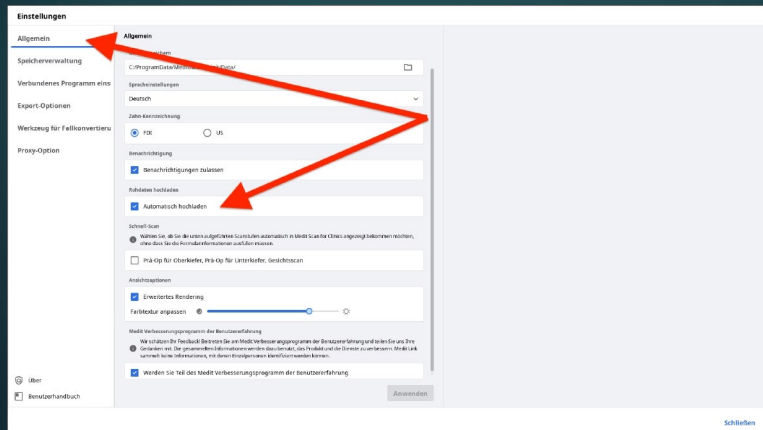

144 Speaker: Christian Musiol, Dirk Ernesti, Jens van Laak | 16.01.25



Und wie macht man das ?


Ganz Einfach

Sie gehen in die allgemeinen Einstellungen und setzen ein Häkchen bei

'Rohdaten automatisch hochladen'.

Der Upload dauert dann etwas länger, aber das bemerkt man nicht so sehr, weil vieles im Hintergrund passiert

Datenverwaltung

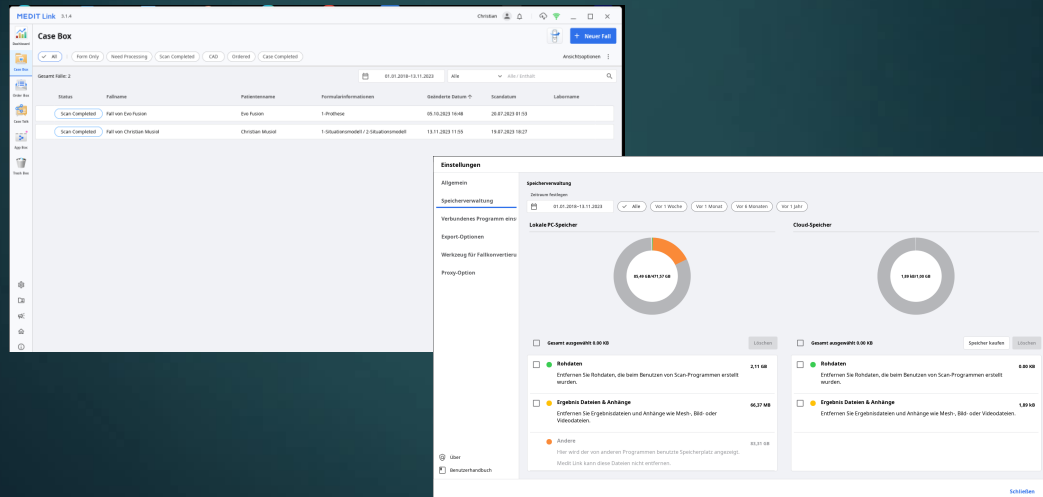

145 Speaker: Christian Musiol, Dirk Ernesti, Jens van Laak | 16.01.25



Haben wir alles erledigt und Speicher gekauft, dann können wir mit der Datenverwaltung beginnen und alles auf die Cloud laden.
Hier ein Beispiel:

Wie Sie sehen können, sind es zwei Fälle, die ich auf dem Rechner habe.
Auf der Cloud sind keine Daten vorhanden, und ich möchte sie auf der Cloud haben.

Normalerweise, wenn Sie nichts auf der Cloud gelöscht haben, wird das automatisch darauf geladen und gespeichert.


Denn die Rohdateien werden automatisch geladen, wenn das Häkchen gesetzt ist, und die Ergebnisdateien sowieso erstmal .

Aber ich gehe davon aus, dass Sie die Cloud schon mehrmals bereinigt haben und manche Dateien gelöscht sind

deswegen

bevor wir mit dem Löschen auf den Rechner beginnen sollen wir lieber erstmal Überprüfen was noch nicht in der Cloud ist

Datenverwaltung

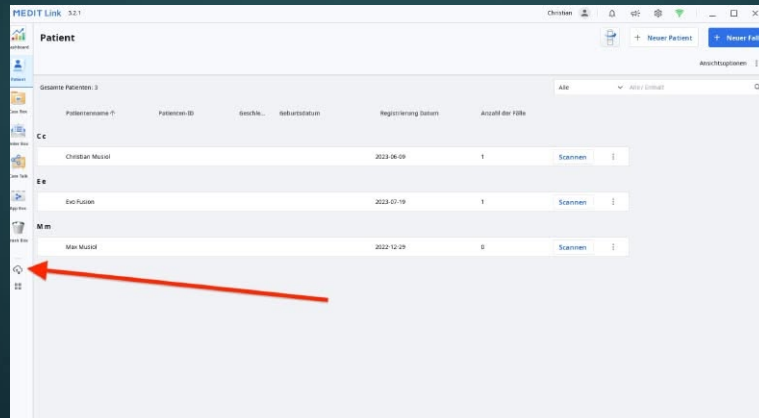

146 Speaker: Christian Musiol, Dirk Ernesti, Jens van Laak | 16.01.25




Und das machen Sie sie in dem Sie auf Auf die Wolke gehen

Die ist der Synchronisationsmanager.

Einfach drauf Klicken

Datenverwaltung

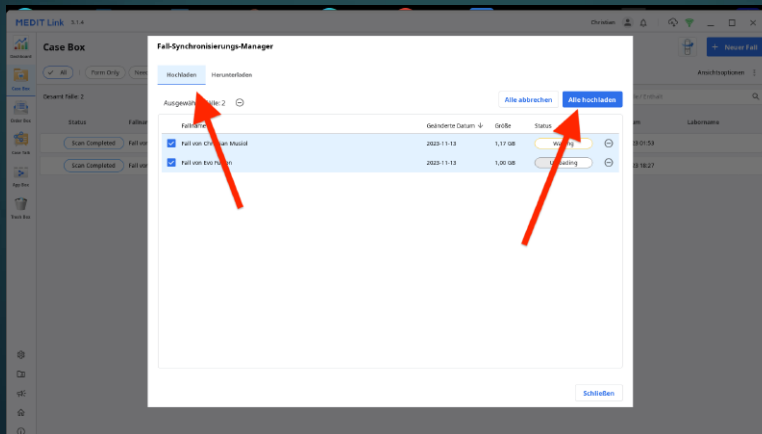

147 Speaker: Christian Musiol, Dirk Ernesti, Jens van Laak | 16.01.25



Dann öffnet sich ein Fenster, und wenn Sie auf 'Hochladen' gehen, also ganz links

Dann werden alle Daten angezeigt, die zwar auf dem Rechner vorhanden sind, aber nicht in der Cloud.
Wenn hier nichts steht, haben Sie alles in der Cloud.

Genauso ist es umgekehrt: Wenn Sie da auf 'Herunterladen' klicken, sehen Sie alle Daten, die in der Cloud sind, aber nicht auf dem Rechner.
Das ist jedoch für uns uninteressant, weil wir natürlich so wenig wie möglich auf dem Rechner haben wollen.


Also, ich habe zwei Dateien auf dem Rechner, die nicht in der Cloud sind, und ich möchte sie jetzt in die Cloud hochladen

,damit ich die vom Rechner löschen kann

Hier kann ich theoretisch die Dateien auswählen, die ich hochladen möchte

oder einfach auf 'Alle Hochladen' klicken, und dann wird alles, was noch auf dem Rechner ist, aber nicht in der Cloud, komplett hochgeladen.

Datenverwaltung

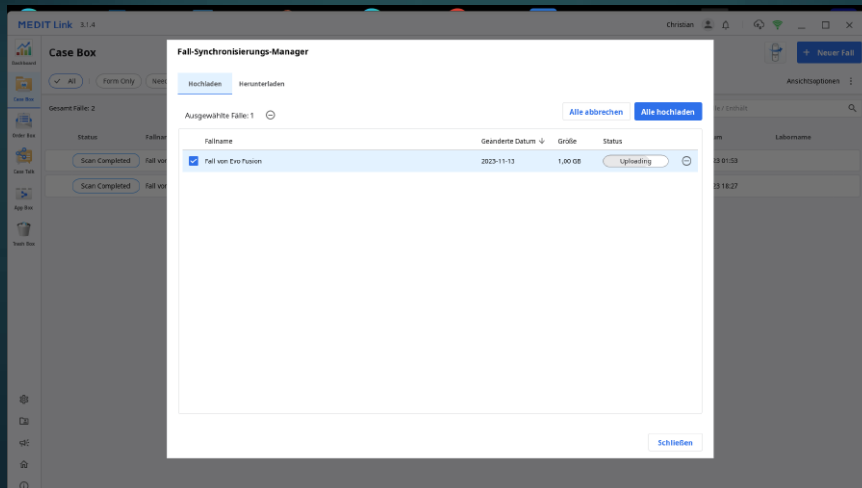

148 Speaker: Christian Musiol, Dirk Ernesti, Jens van Laak | 16.01.25



Wenn sie drauf geklickt haben

dann werden alle Daten nacheinander aus dem Fenster verschwinden sobald die hochgeladen sind.

Wenn alle Daten in der Cloud vorhanden sind, ist das Fenster leer.

Je nachdem, wie lange Sie das nicht gemacht haben, kann das natürlich eine Weile dauern, bis alles hochgeladen ist

Einstellungen

- Allgemein
- Speicherverwaltung**
- Verbundenes Programm eins.
- Export-Optionen
- Werkzeug für Fallkonvertieren
- Proxy-Option

Speicherverwaltung
 Zeitraum festlegen
📅 01.01.2018 – 24.09.2023
 Alle
 Vor 1 Woche
 Vor 1 Monat
 ✓ Vor 6 Monaten
 Vor 1 Jahr

Lokale PC-Speicher

Gesamt ausgewählt: 0.00 KB

☒ Rohdaten	Entfernen Sie Rohdaten, die beim Benutzen von Scan-Programmen erstellt wurden.	0.00 KB
☒ Ergebnisse Dateien & Anhänge	Entfernen Sie Ergebnisdaten und Anhänge wie Mesh-, Bild- oder Videodateien.	0.00 KB
☐ Andere	Nur wird dir von anderen Programmen benutzte Speicherplatz angezeigt. Meist Link kann diese Daten nicht entfernen.	83,86 GB

Cloud-Speicher

Gesamt ausgewählt: 0.00 KB


☒ Rohdaten	Entfernen Sie Rohdaten, die beim Benutzen von Scan-Programmen erstellt wurden.	0.00 KB
☒ Ergebnisse Dateien & Anhänge	Entfernen Sie Ergebnisdaten und Anhänge wie Mesh-, Bild- oder Videodateien.	0.00 KB



permardental®
Modern Dental Group

alles auswählen und dann auf Löschen drücken.

Datenverwaltung

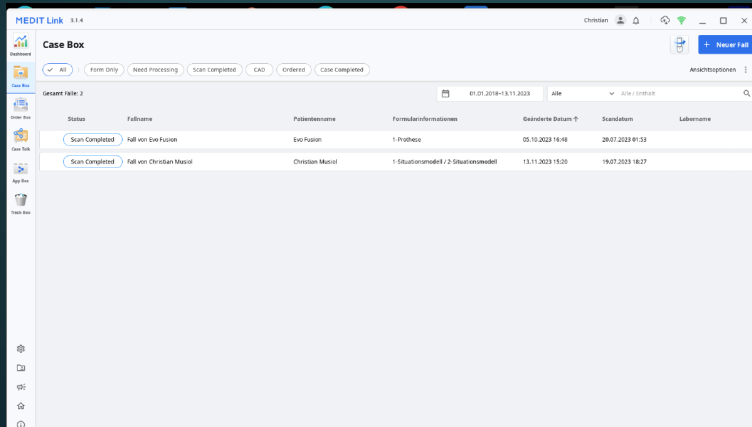

The screenshot shows the MEDIT Link Case Box interface. At the top, there are tabs for 'All', 'Form Only', 'Need Processing', 'Scan Complete', 'CAD', 'Ordered', and 'Case Completed'. Below these tabs, a table lists dental cases. The table has columns for Status, Fdnahme, Patientenname, Formulareinformationen, Geänderte Datum, Scan Datum, and Lebensname. Two cases are visible: 'Fall von Eva Füssen' and 'Fall von Christian Musiol'.


Status	Fdnahme	Patientenname	Formulareinformationen	Geänderte Datum	Scan Datum	Lebensname
Scan Completed	Fall von Eva Füssen	Eva Füssen	1-Prethase	05.10.2023 16:46	28.07.2023 01:53	
Scan Completed	Fall von Christian Musiol	Christian Musiol	1-Situationsmodell / 2-Situationsmodell	13.11.2023 15:20	19.07.2023 18:27	

150 **Speaker:** Christian Musiol, Dirk Ernesti, Jens van Laak | 16.01.25



Die Namen bleiben alle jedoch in der Casebox,
und wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, ist es auch kein Problem, die wieder abzurufen
Einfach auf den Namen klicken, es dauert vielleicht nur einen Moment, und dann werden sie heruntergeladen.

Datenverwaltung

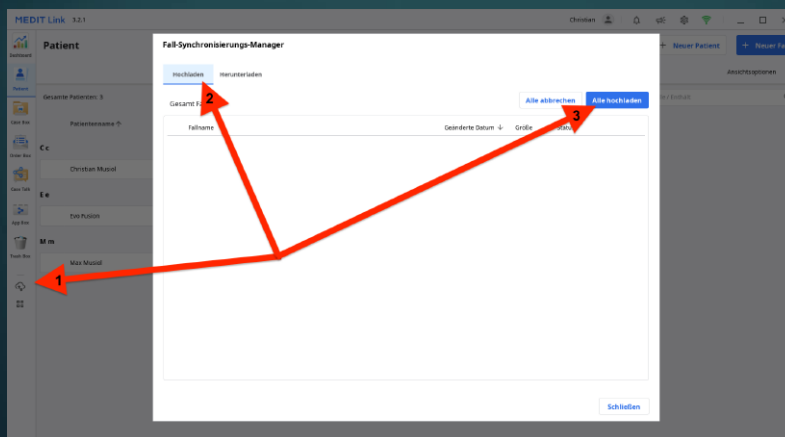

151 Speaker: Christian Musiol, Dirk Ernesti, Jens van Laak | 16.01.25



wenn Sie das jetzt regelmässig machen dann bitte vorher immer in den Synchronisationsmanager nachschauen, ob alles hochgeladen ist


Ist alles leer, bedeutet das, dass bereits alles hochgeladen wurde.

und das das ist auch meistens dann der Fall,

weil wir vorher schon alles auf automatisch gestellt haben

So haben Sie mindestens die nächsten 10 Jahre Ruhe, bis der Speicher in der Cloud voll ist

Datenverwaltung

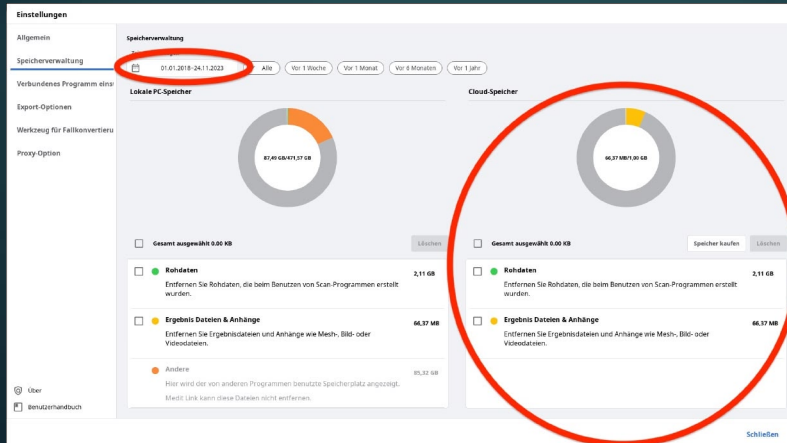

152 Speaker: Christian Musiol, Dirk Ernesti, Jens van Laak | 16.01.25



und wenn die irgendwann voll sein sollt

ist das Problem ist weil dann auch Individuell die Zeiträume auswählen können und so den Speicher zu löschen .