

SCAN-BASICS – MEDIT IOS

Um einen erfolgreichen Scan durchzuführen, bitten wir Sie, folgende Punkte einzuhalten:

1 Vorbereitung:

- Scanbodies in HD scannen
- Wenn Sie einen Prä-OP-Scan auswählen, wird der Biss **nur** auf Basis des Prä-OP- und des Antagonisten-Scans durchgeführt.

2 Scan:

- Scan-Pfad nach Vorlage exakt einhalten.
- Der Scan muss immer in der Reliability-Optik (Rot-Grün-Ansicht) kontrolliert werden.
- Alle relevanten Bereiche wie Stumpf, Okklusionsflächen, Kontaktpunkte und die vestibuläre Ansicht müssen in Grün dargestellt werden.
- Wenn Sie mehr als einen Quadranten scannen, müssen 2 Bisse gescannt werden (links/rechts).
- Ein Biss-Scan sollte eine Spanne von 3-5 Zähnen haben. Wenn Sie eine größere Spanne (mehr als 6 Zähne) scannen, kann es zu einer Ungenauigkeit kommen.
- Die Okklusionsanalyse sollte IMMER durchgeführt werden. Wenn Sie fehlerhaft ist, ist ein Einschleifen seitens der Praxis wahrscheinlich.

3 Datenverarbeitung:

- In der Datenverarbeitung werden Sie gefragt, wie die Dateien abgespeichert werden sollen. Für unser Labor ist es wichtig, dass das **Linke Symbol** (Daten verarbeiten so wie sie sind.) ausgewählt wird.